

## 1107242 - CryoPen M - (2 applicateurs inclus) - 1 pc



### Déscription

Le cryoPen M vous pouvez utiliser la cryothérapie pour traiter les verrues, la kératose, les hémangiomes ou les molluscum. Le stylo libère un fin jet de gaz sous haute pression, vous permettant de travailler avec une grande précision. Il peut être utilisé dans les cabinets des ophtalmologistes, des dermatologues, des pédiatres et aussi des vétérinaires. Aucune préparation particulière n'est nécessaire, le cryopen est utilisé sur chaque point pendant 2 à 25 secondes. En cas d'imperfections cutanées plus importantes, un mouvement circulaire ou croisé est nécessaire pour traiter tous les tissus.

## Spécifications

<b>Marque</b>	H&O Equipments
<b>Applicateurs inclus</b>	Blanc/rouge (2 - 6 mm) Bleu/rouge (1 - 3 mm)
<b>Catégorie cryothérapie</b>	Cryopen
<b>Convient pour</b>	Cartouches 8g N2O
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Traitement cryothérapie</b>	Petites lésions superficielles
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Utilisateurs</b>	Dermatologues Esthétique Médicale Généralistes Instituts de beauté Pédiatres
<b>Utilisation</b>	Utilisation moins fréquente