

## 1576261 - ComfyBelly avec cover - medium - 1 pc



### Déscription

#### Pour soutenir le développement de votre bébé

#### À propos du ComfyBelly :

Le ComfyBelly a été développé pour soutenir la position ventrale des bébés malades et prématurés à l'hôpital. ComfyBelly contribue à un arrondi naturel des épaules et favorise la coordination main-bouche et l'orientation de la ligne médiane. Il s'agit de points essentiels pour favoriser le développement des bébés. Le ComfyBelly permet d'incliner les jambes de l'enfant vers l'avant avec le bassin et de favoriser la flexion des membres sans exercer une pression excessive sur les genoux et les coudes.

#### Utilisation du ComfyBelly :

- Placez le ComfyBelly sous la tête et le torse.
- Pas plus bas que la hauteur du nombril et pas plus large que le torse.
- Veillez à ce que les épaules soient légèrement fléchies et soutenues.
- Assurez-vous que les pieds sont relevés.
- Assurez-vous que le bébé est soutenu par les bords du ComfyNest ou Boundy.

#### Informations pratiques concernant le Benjamin ComfyBelly:

- Le ComfyBelly est disponible en quatre dimensions : Small (500 à 1 500 grammes), Medium (1 500 à 2 500 grammes), Large (2 500 à 4 000 grammes) et Extra Large (4 000 à 5 500 grammes).
- La couverture en tissu est faite de textiles techniques.
- La partie intérieure est amovible selon le protocole hospitalier.
- Le ComfyBelly est lavable à 60-95° et convient au sèche-linge.
- Il peut être utilisé en combinaison avec le avec ComfyNest ou Boundy.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Benjamin Care
<b>SKU leverancier</b>	CB-007-000-M
<b>Taille</b>	M
<b>Type d'emballage</b>	Pièce