

## 1107242 - CryoPen M - (2 applicatoren inbegrepen) - 1 st



### Beschrijving

Met de cryoPen M kan men cryotherapie gebruiken voor het behandelen van wratten, keratose, hemangiomen of molluscum. De pen geeft onder een hoge druk een fijne straal gas af waardoor je zeer nauwkeurig kan werken. Het kan gebruikt worden in praktijken bij oogartsen, huidartsen, kinderartsen en ook dierenartsen. Er is geen speciale voorbereiding nodig, de cryopen wordt gebruikt op elke plek gedurende 2 tot 25 seconden. In geval van grotere huidoneffenheden is een cirkelvormige of kruisende beweging nodig om alle weefsels te behandelen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	H&O Equipments
<b>Applicatoren inbegrepen</b>	Blauw/rood (1 - 3 mm) Wit/rood (2 - 6 mm)
<b>Categorie cryotherapie</b>	Cryopen
<b>Compatibel met</b>	8g N2O patronen
<b>Cryotherapiebehandeling</b>	Kleine oppervlakkige laesies
<b>Gebruik</b>	Minder frequent gebruik
<b>Gebruikers</b>	Dermatologen Huisartsen Kindergeneeskunde Medische Esthetiek Schoonheidsspecialisten
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Stuk