



Katheteronderhoud

Uro-Tainer® is een gesloten systeem en direct gebruiksklaar! Regelmatig gebruik van Uro-Tainer® Suby G of Solutio R vermindert kristalvorming in de katheter en voorkomt het risico op urineweginfecties. Waardoor de katheter minder vaak vervangen hoeft te worden.

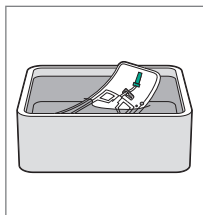


Stap 1

Uro-Tainer® is steriel verpakt en mag pas uit de verpakking worden gehaald wanneer je het product gaat gebruiken. Dompel de verpakte zak in lauw water totdat deze op lichaamstemperatuur is (37 graden).

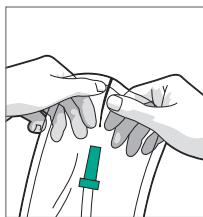


Stap 2

Scheur de verpakking open en haal de Uro-Tainer® uit de plastic verpakking.

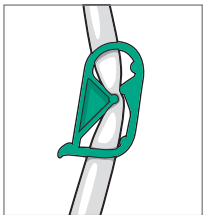


Stap 3

Sluit de klem door deze samen te drukken en vast te klikken.

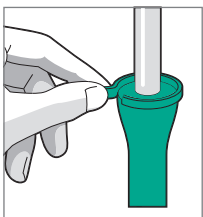


Stap 4

Verwijder de afscheurbare sluitring helemaal. Draai de dop los en verwijder deze zonder de steriele connector aan te raken.

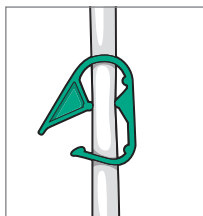

Stap 5

Open de klem en laat een paar druppels vloeistof in de katheter stromen om eventuele luchtballen te voorkomen.

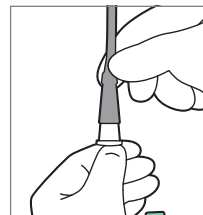

Stap 6

Sluit de connector aan op de katheter. Laat de Uro-Tainer® vloeistof in de katheter stromen zoals weergegeven bij stap 7.




Stap 7

Houd Uro-Tainer® boven het blaasniveau. Laat de vloeistof door zwaartekracht in de blaas stromen. Knijp niet in de zak. Wacht totdat er geen vloeistof meer naar binnen stroomt en sluit de klem.



Stap 8

Open na 5 minuten de klem. Houd Uro-Tainer® onder het blaasniveau zodat de gebruikte vloeistof terug kan stromen in de zak. Sluit de klem als de zak vol is en haal Uro-Tainer® uit de katheter.

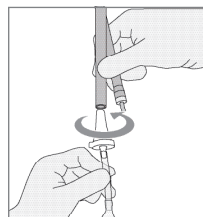

Stap 9

Verwijder de connector uit de katheter door voorzichtig te draaien. Sluit nu de katheter aan op een urinezak. Uro-Tainer® is voor eenmalig gebruik, gooi deze weg.

Deze gebruiksinstructie geeft extra informatie over het gebruik van Uro-Tainer®. Lees voor gebruik altijd eerst de bijsluiter.

