



Korte handleiding Schiller Cardiovit FT-2

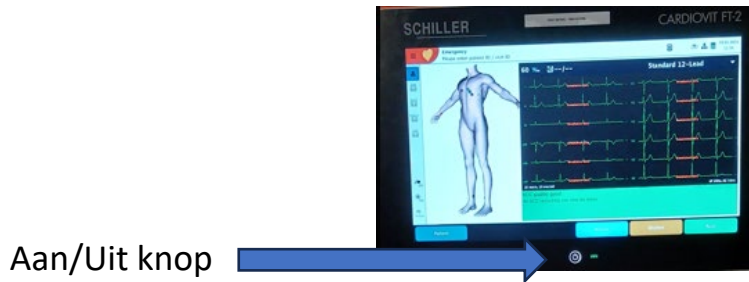

ECG workflow

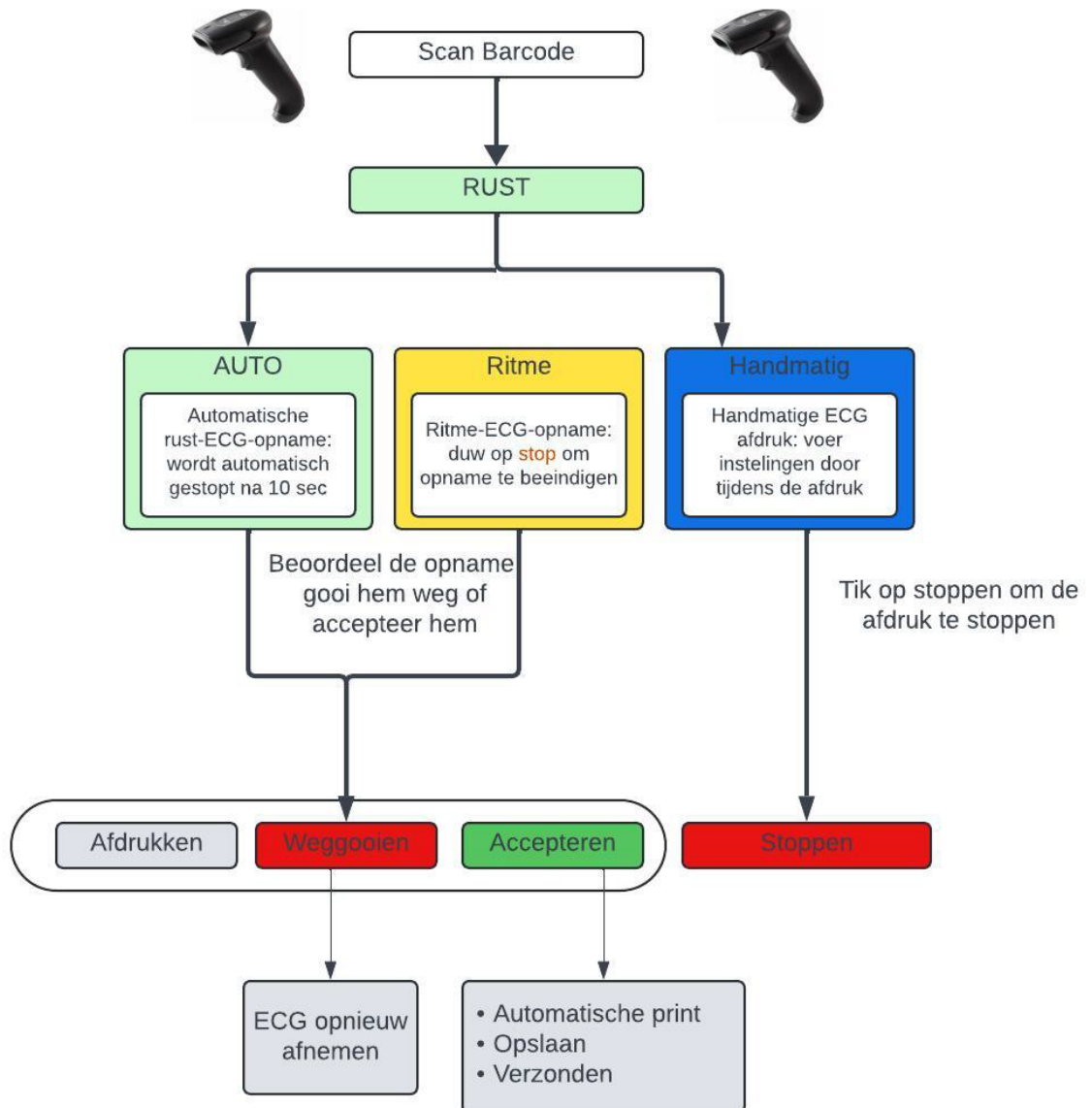

Vervangen thermisch papier

1. Druk op de schuifknop rechts



→ De papierlade wordt geopend

2. Verwijder het resterende papier dat er nog in zit.



3. Plaats het papier met het raster omhoog gericht en de zwarte markeringen zichtbaar:



4. Trek het bovenste vel eruit.
5. Duw de papierlade dicht totdat het vergrendelmechanisme op zijn plaats klikt.
→ De printer is klaar voor gebruik.