



TechniCare
Improving Healthcare

A woman with curly brown hair, wearing a white lab coat over a yellow top and dark pants, is using a blue handrail on a piece of medical equipment. She is looking down at the handrail. The background is a bright, blurred hospital hallway with white walls and ceiling lights.

Mobilyzer

Gebruiksaanwijzing





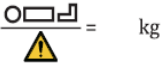

INDEX

1.	Introductie	3
1.1.	Beoogd gebruik	3
1.2.	Veiligheid	3
1.3.	Garantie	3
2.	Product	4
2.1.	Ingebruikname	4
2.2.	Onderdelen	6
2.2.	Technische gegevens	8
3.	Functionaliteiten	9
3.1.	Wielblokkering	9
3.2.	Hoogte verstelbaarheid stuur	9
3.3.	Verrijden	9
3.4.	Infuushaken	9
3.5.	Infuusbuizen	9
3.6.	Z01-01-106 Schuifhaak DUO (accessoire)	10
3.7.	Z01-01-105 (accessoire)	10
3.8.	Z01-01-315 (accessoire)	10
3.9.	Z01-01-303 (accessoire)	10
3.10.	Cilinderhouders	10
4.	Reiniging en onderhoud	11
4.1.	Reiniging	11
4.2.	Onderhoud	12
4.3.	Vervangingsadvies onderdelen	12
5.	Probleemoplossing	14
	Verklaring van conformiteit	15
	Bijlage I, Product referentielijst	16

Fabrikant

TechniCare Ridderkerk B.V.
Nikkelstraat 24
2984AM Ridderkerk
+31 (0)85 0870 421
www.technicare.nl
info@technicare.nl

Uitleg symbolen op label

MD	Medical Device		Let op
UDI	Unique Device Identifier		Raadpleeg de gebruikershandleiding
REF	Artikelnummer		Productiedatum
SN	Serienummer		Gegevens fabrikant
LOT	Batchnummer		Maximaal gebruikersgewicht
			Maximale belasting

1. Introductie

1.1. Beoogd gebruik

De Mobilyzer is een combinatie van een loophulp en een infuuspaal. De Mobilyzer helpt de patiënt in zelfredzaamheid en ondersteunt de patiënt bij het opstaan en lopen.

Om de Mobilyzer goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften op te volgen.

Het is niet toegestaan zelfstandig aanpassingen te verrichten of accessoires te plaatsen op de Mobilyzer, anders dan de door de fabrikant aangeboden accessoires.

De verwachte technische levensduur van de Mobilyzer is 15 jaar, mits voor onderhoud het aanbevolen onderhoudsschema wordt uitgevoerd.

1.2. Veiligheid

Het niet naleven van de beschrijvingen en veiligheidsvoorschriften kan leiden tot gevaarlijke situaties. Lees deze daarom voor gebruik door.

Gebruik

- Het is niet toegestaan het stuur van de Mobilyzer te belasten met een gewicht van meer zoals beschreven in de technische specificaties.
- Controleer voor gebruik de omgeving op uitstekende delen en mogelijk gevaarlijke situaties.
- Controleer voor gebruik de omgeving op drempels en overige oneffenheden in vloerovergangen.
- De Mobilyzer is geschikt voor het overrijden van liftovergangen.
- De Mobilyzer is geschikt voor gebruik tot een maximale hellingshoek van 4 graden.
- Er mag niet op de Mobilyzer worden gestaan, op zowel het onderstel als andere delen.
- Rijd altijd voorwaarts over toegestane obstakels heen.
- De Mobilyzer mag niet gebruikt worden op ongelijke en/of schuine ondergronden.
- De Mobilyzer mag alleen binnen gebruikt worden.
- De Mobilyzer moet worden gebruikt in een schone en nette werkomgeving.

Onderhoud

- De Mobilyzer dient 1x per jaar geïnspecteerd te worden op: beschadigingen en wielen.
- Het vervangen van constructieve delen van de Mobilyzer mag alleen worden gedaan door TechniCare geautoriseerde partijen en personen.
- Indien de Mobilyzer vervormd of hevig beschadigd is door foutief gebruik, transport, ondeskundig onderhoud of een ongeluk dient deze niet meer gebruikt te worden. Er moet dan contact op worden genomen met de leverancier.

1.3. Garantie

De producten van TechniCare hebben 24 maanden garantie. Op de wielen zit 12 maanden garantie.

Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zit geen garantie, tenzij er sprake is van constructie en/of materiaalfouten.

2. Product

2.1. Ingebruikname

Stap 1

Laat de cliënt staan voor het verpleegbed.

Stap 2

Plaats de Mobilyzer geremd voor de cliënt.

Stap 3

Stel het stuur van de Mobilyzer in op de juiste hoogte voor de cliënt. Wanneer de armen recht langs het lichaam hangen, moeten de handvatten ter hoogte van het midden van de onderarmen zitten.

Premium:

Draai aan de sterknop totdat het stuur lossert om de ovale buis te laten zitten. Het stuur kan nu omhoog en omlaag geschoven worden. Draai de sterknop weer aan om het stuur vast te zetten op de juiste hoogte.

Excellent:

Open de hevel op het stuurhuis. Het stuur kan nu omhoog en omlaag geschoven worden. Door de hevel weer dicht te doen wordt het stuur gefixeerd op de ingestelde hoogte.

Stap 4

Eventuele apparatuur en overige onderdelen zoals infuus- en katheterzakken kunnen worden overgezet op de Mobilyzer.

Binnen deze handleiding vindt u de maximale belasting per Mobilyzer model.

Stap 5

Haal de Mobilyzer van de remmen af.

Stap 6

De cliënt kan zich nu voortbewegen met de Mobilyzer.

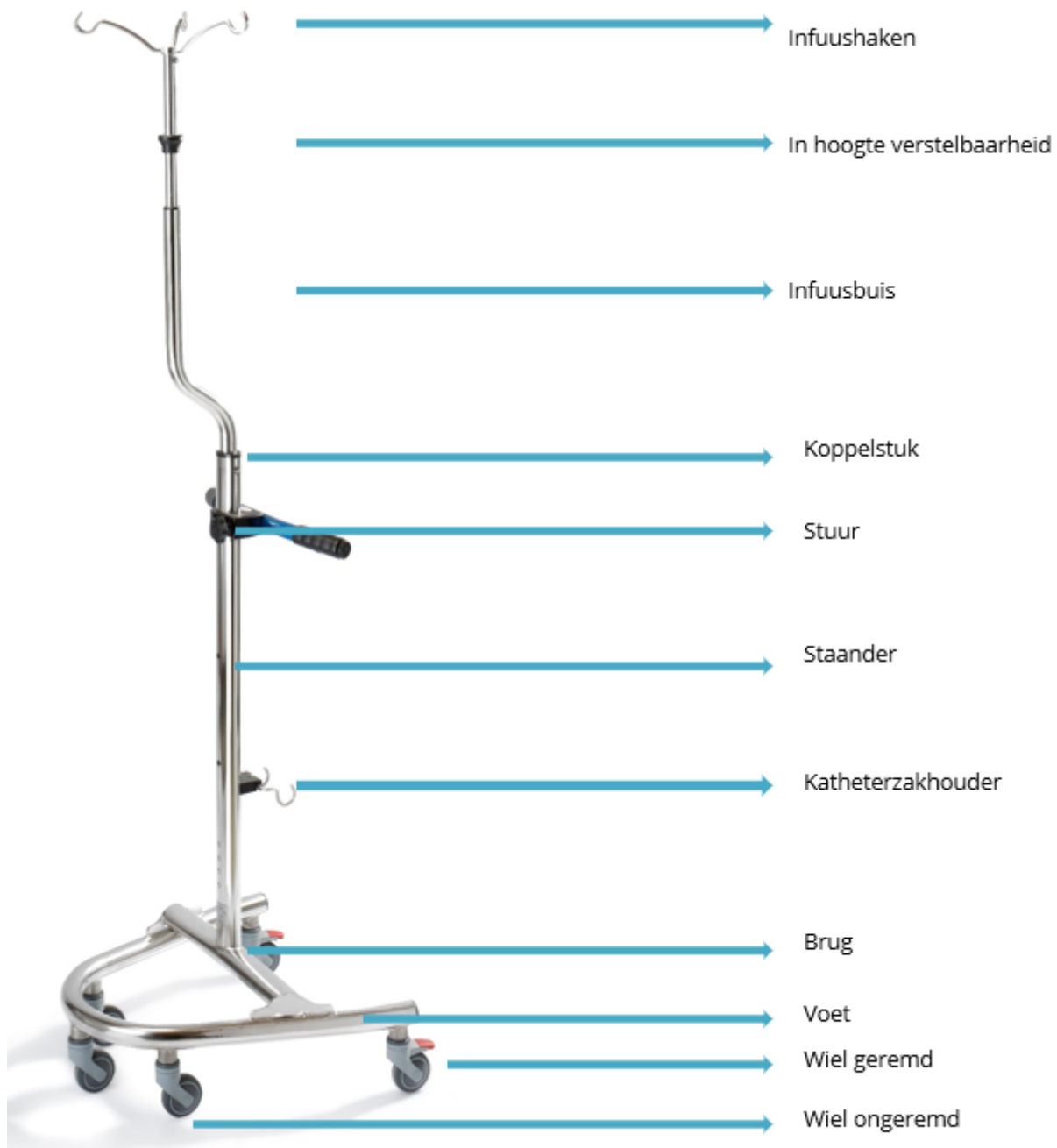
Gebruik

	Mobilyzer Premium	Mobilyzer Excellent
Afdelingsniveau	Ziekenhuisbreed in te zetten	Specifiek gefocust op: <ul style="list-style-type: none"> - Oncologie - Cardiologie - Revalidatie - Fysiotherapie - Geriatrie - Hematologie. - ICU - Andere hoog intensieve afdelingen.
Patient populatie	Ziekenhuisbreed, populatie in staat om zelf te stappen en zonder ondersteuning zich staande te houden.	Specifiek intended use voor extra ondersteuning en comfort
Maximale praktische belasting	Max. 3x losse pomp of Max. 1x Docking station	Niet van toepassing Middels accessoire pomphouder extra plaats voor pompen.

2.2. Onderdelen

Delen van het product

Op onderstaande afbeelding staan de verschillende delen van het product benoemd.



CE-markering en stickers



Mobilyzer Premium		= 130 kg	
REF	Z01-01		XX-XXXX
SN	XXXXXXXX-XXX	TechniCare B.V. Nikkelstraat 24 2984 AM Ridderkerk www.technicare.nl	
LOT	XXX		
UDI	MD		
(01) 8719327397343(11)YYYYMMDD(21)SN			

2.2. Technische gegevens

Materialen

Onderdeel	Materiaal
Infuusbuis (accessoire)	RVS304 buis gepolijst/gestraald
Koppeldeel infuusbuis-Mobilyzer	Kunststof
Stuur	Aluminium geanodiseerd met kunststof handvaten POM klemstuk
Onderstel + Staander	RVS ovalen buis gepolijst
Wielen	Kunststof

Afmetingen en specificaties

Specificatie	Technische gegevens
Max. gebruiksgewicht	130 KG
Max. belasting infuushaken	3 KG per haak
Max. belasting stuur	45 KG Mits goed bevestigd en aangedraaid
Totale breedte	60CM
Totale lengte	55CM
Totale hoogte zonder infuusbuis	114CM
Totale hoogte met infuusbuis	Afhankelijk van infuusbuis
Merk wielen	TENTE
Diameter wielen	75 mm

maattekening

3. Functionaliteiten

3.1. Wielblokkering

- De twee achterste wielen van de Mobilyzer zijn op de rem te zetten.
- De Mobilyzer kan op de rem worden gezet door de rode lip op het wiel naar beneden te trappen.
- Om de Mobilyzer van de rem af te halen moet dezelfde rode lip van het wiel omhoog bewogen worden door op de bovenkant van de lip te trappen.
- Zet altijd alle twee de wielen op de rem wanneer u de Mobilyzer wilt blokkeren.

3.2. Hoogte verstelbaarheid stuur

- Het stuur is in hoogte verstelbaar.
- De minimale hoogte is afhankelijk van welke accessoires in combinatie met de Mobilyzer worden gebruikt worden gebruikt.

3.3. Verrijden

- De Mobilyzer is geschikt voor indoor gebruik.
- De Mobilyzer is geschikt ter vervanging van een infuuspaal.
- Tijdens het verrijden moet de Mobilyzer altijd vastgehouden aan de hiervoor bedoelde handvatten. Trekken/duwen op andere plekken kan zorgen voor schade en/of gevaarlijke situaties.
- De Mobilyzer moet altijd voorwaarts over obstakels worden heen gereden. Hierbij moet het stuur goed worden vastgehouden
- De Mobilyzer is niet geschikt voor hellingen groter dan 4 graden.

3.4. Infuushaken

- De Infuushaken zijn geschikt tot een gewicht van 3KG per haak

3.5. Infuusbuizen

- Artikelnummers:
- Maximaal belasting: Max. 3 losse units per infuusbuis
- Max. belasting per haak: 5KG

Infuusbuizen
Z01-01-102
Z01-01-103
Z01-01-109
Z01-01-112
Z01-01-113
Z01-01-133
Z01-01-116
Z01-01-118
Z01-01-117
Z01-01-107

3.6. Z01-01-106 Schuifhaak DUO (accessoire)

- Te bevestigen: Max. 2 infuuszakken
- Per infuuszak: Maximaal 500ml

3.7. Z01-01-105 (accessoire)

- Enkel toe te passen op Mobilyzer Excellent (Artikel Z01-02)
- Te bevestigen: Maximaal drie infuuspompen
- Uit te breiden naar:
 - Extra pomphouders
 - Extra Din-rail
 - Artikel Z01-01-119

3.8. Z01-01-315 (accessoire)

- Toe te passen op Mobilyzer Premium (Z01-01)
- Te gebruiken als koppelmethode aan achter/voorzijde van buisdiameter 40mm.
- Let bij overgang in gekoppelde modus op lift- en vloerovergangen.
- Hoogteverstelling middels hoogteverstelling van het stuur
- Haak dient volledig **geklemd** over de rand te zijn geplaatst

3.9. Z01-01-303 (accessoire)

- Te gebruiken als bevestigingsmethode voor katheterzak.
- Maximaal één zak per haak
- Maximaal 2 KG totaal

3.10. Cilinderhouders

- Artikelnummers:
- Maximaal één cylinder fles per houder
- Houder diverse afmetingen op basis van zuurstofflescylinder
- Maximaal inhoud zuurstoffles: 2L

Cilinderhouders
Z01-01-201
Z01-01-202
Z01-01-203
Z01-01-206
Z01-01-204
Z01-01-205
Z01-01-207
Z01-01-208

4. Reiniging en onderhoud

4.1. Reiniging

Reinigingsschema	
Na ieder gebruik	Frame reinigen met water en aangegeven schoonmaakmiddelen

Desinfectantia

Wanneer u gebruik maakt van een desinfectant controleer dan altijd of uw product bij deze onderstaande lijst staat. Wanneer u desinfectant niet in deze lijst staat, neemt u dan contact met ons op, zodat we uw schoonmaakmiddel kunnen controleren. Indien uw schoonmaakmiddel volstaat aan de vereisten, ontvangt u schriftelijk akkoord op het gebruik van uw schoonmaakmiddel. Overschrijd **nooit** de aangegeven dosering. Gebruik **geen** jodtinktur.

Product naam	Hoeveelheid	Product naam	Hoeveelheid
Incidin Plus (Ecolab)	2%	Actichlor Plus (Ecolab)	1000 ppm
Kodan Tinktur Forte (Schulke)	Puur	Anios DDHS (Anios Laboratories)	Puur
Mikrobac Forte (Hartmann)	4%	B45 Orochemie)	Puur
Sodiumhypochlorite (Standaard)	1000 ppm	Bacillol 30 Foam (Hartmann)	Puur
Octenispert (spray) (Schulke)	Puur	Clinell Sporidical Wipes (Garna Healthcare)	Puur
P3-topax 66 (Ecolab)	5%	Chlor-Clean tablets (Guest Medical)	1000 ppm
Sagrotan (spray) (Reckitt Benckiser)	Puur	Dettol (Reckitt Benckiser)	5%
Sanit P20 (Iberian Cleaning Expert)	Puur	Dismozon Pur (Hartmann)	4%
Spring (Kalle Original)	Puur	Formaldehyde (Pharmacy)	30%
Sprint 200 (Diversey)	2%	Germatol (Kiarah Chem)	5%
Suma Bac D10 (Johnson Diversey)	1%	Hansamed (spray) (Beiersdorf AG)	Puur
Surfa'Safe (Anios Laboratories)	Puur	Haz-Tabs (Guest Medical)	1000 ppm
Topmax 421 (Ecolab)	5%	Hibicet (Molnlycke Health Care)	Puur
Virkon (Du Pont)	10 g/l	Incidin Extra N (Ecolab)	2%
Volvone (Oyar)	40%		

4.2. Onderhoud

Onderhoudsschema	
Na ieder gebruik	Visuele controle of alle onderdelen aanwezig zijn Visuele controle op schade
Wekelijks	Wielen controleren op haren, stof en zeepresten en verwijderen waar nodig
Maandelijks	Grondige controle op beschadigingen
Jaarlijks	Uitvoeren van periodieke inspectie: <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de stickers leesbaar zijn • Controleer de Mobilyzer op beschadigingen/corrosie • Controleer of alle onderdelen vast zitten • Controleer de wielbevestiging en de remmen • Controleer of alle vijf de wielen de grond raken • Controleer of de rem lip intact is

4.3. Vervangingsadvies onderdelen

Onderdeel	Vervangingsadvies
Wielen	Indien nodig
Stuur	Indien nodig
Pennen t.b.v. wielen	Indien nodig

4.4 Schoonmaken

Algemeen

- De Mobilyzer is geproduceerd uit RVS en aluminium. Om deze reden borgt fabrikant een lange levensduur en is het product zeer goed te reinigen. Het is toegestaan het product te reinigen middels alcohol bevattende schoonmaakmiddelen.
- Om de levensduur van de diverse onderdelen te garanderen, is het van belang om dit reinigingsprotocol te volgen.
- De complete Mobilyzer is geen voedingsbodemp voor micro-organismen en hoeft derhalve ook niet als dergelijk te worden behandeld.
- Desinfectantia met alcoholhoudende stoffen zijn toepasbaar op de onderdelen zonder kwaliteitsverlies.
- Alle onderdelen kunnen op de onderstaande wijze gelijk gereinigd worden.

Doel van het reinigen

- Het voorkomen van besmetting van de patiënt
- Het voorkomen van besmetting van de medewerker
- De conditie van het product te behouden

Dagelijkse schoonmaak

- Controleer op oppervlakkig vuil of andere ongewenste stoffen. Indien deze geconstateerd zijn, schoon maken met een natte schone doek die boven de 80 graden Celsius is gewassen. Indien nodig een desinfectant gebruiken.
- De natte doek dient lichtvochtig te zijn met lauw warm water.



Patiënt wissel schoonmaak

- Na iedere wisseling van patiënt dient het product schoon gemaakt te worden met een vochtige doek.

Periodieke schoonmaak

- Het product is niet geschikt voor gebruik binnen een wasstraat.



LET OP: Controleer bij het afnemen of verstellen van de accessoires uw omgeving, zodat u geen schade berokkent bij uzelf of andere personen.

5. Probleemoplossing

Hieronder worden de meest voorkomende problemen benoemd met mogelijke oplossingen. Kijk of uw probleem in de lijst staat en probeer de oplossingen hiervoor. Indien uw probleem niet in de lijst staat, kunt u contact opnemen met

Probleem	Mogelijke oplossing
Mobilyzer verrijdt niet goed	Schoonmaken wielen
	Vervangen wielen
	Vervangen pennen waarop wiel gemonteerd is.
Infuusbuis klemt niet goed	Koppelstuk vervangen
Infuushaken zitten niet goed vast	Aandraaien schroef incl. bevestiging loctite 243
Stuur fixeert niet	Vervangen draaiknop
	Vervangen POM

Verklaring van conformiteit

Wij,

Technicare Ridderkerk B.V. met de volgende eigenschappen:

Bedrijfsnaam: TechniCare Ridderkerk B.V.
Handelsnaam: TechniCare
Adres: Nikkelstraat 24
Postcode: 2984AM
Land: Nederland
GS1 Prefix Code: 87193273974
SRN Code: NL-MF-000005899

verklaren hierbij dat het CE-gemarkeerde product waar deze verklaring betrekking op heeft,

Product: Mobilyzer Premium/Excellent
Artikelnummer: Z01-01 / Z01-02
Accessoires: Zie Bijlage I
UDI-DI Code: 8719327397343
SRN Code: 8719327397343
GMN Code: 87193273974Z01-01AB
Basic UDI-DI Code (01) 8719327397343(17)xxxxxx(10)xxx(21)xxxx

Is geclassificeerd als:

Medisch hulpmiddel klasse I volgens Annex XIII, Hoofdstuk III van Richtlijn EU/745 (MDR) met betrekking tot medische hulpmiddelen.

Het hulpmiddel dat onder deze verklaring valt is in overeenstemming van de verordening en voldoet aan de essentiële eisen van de Verordening onder verantwoordelijke van de fabrikant:

- EU 2017/745 (MDR) (Medische hulpmiddelen)
- NEN EN 13485
- NEN EN 14971
- NEN EN

Producten die worden gedekt door deze Verklaring van conformiteit zijn toegevoegd aan de product referentielijst (zie bijlage I).

Handtekening:

Datum: 10-06-2022
Naam: Arjan van de Voorde
Functie: Directeur



Bijlage I, Product referentielijst

Fabrikant	Klasse	Artikelnummer	Omschrijving
TechniCare B.V.	I	Z01-01-101	Infuusbuis met 3 haken circulair.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-102	Infuusbuis met 4 haken circulair.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-103	Infuusbuis met 5 haken circulair.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-109	Infuusbuis met 5 haken voorzijde.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-112	Infuusbuis recht met 3 haken circulair.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-113	Infuusbuis recht met 4 haken circulair.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-133	Infuusbuis recht, 3 haken in hoogte verstelbaar, 32mm,
TechniCare B.V.	I	Z01-01-116	Infuusbuis in hoogte verstelbaar met 3 haken circulair.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-118	Infuusbuis in hoogte verstelbaar met 4 haken circulair.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-117	Infuusbuis in hoogte verstelbaar met 5 haken circulair.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-107	Verkort bovendeel met montageplaat.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-006	Mobilyzer Premium, Stuur special made incl. sterknop fixatie
TechniCare B.V.	I	Z01-01-106	Schuifhaak duo Ø30mm.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-105	Pomphouder Ø30mm.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-119	DIN-rail voor pomphouder Ø30mm.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-315	Koppelhaak voor aan het bed Ø40mm
TechniCare B.V.	I	Z01-01-201	Cilinderhouder Ø105mm.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-202	Cilinderhouder Ø122mm.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-203	Cilinderhouder met kooi Ø105mm.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-206	Cilinderhouder met kooi Ø122mm.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-204	Cilinderhouder voor pomphouder Ø105mm.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-205	Cilinderhouder voor pomphouder Ø122mm.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-207	Cilinderhouder voor pomphouder met kooi Ø105mm.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-208	Cilinderhouder voor pomphouder met kooi Ø122mm.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-303	Catheterzakhouder duo.
TechniCare B.V.	I	Z01-01-306	Mobilyzer wielenset, wielen van kunststof.