

ANIOSYME XL3

Reiniging en
pre-desinfectie
van instrumenten

TE VERDUNNEN
PRODUCT
25 ml > 5L



0,5%
5 min.




INDICATIES

Sterk reinigend en pre-desinfecterend product voor medisch-chirurgisch instrumentarium, medische hulpmiddelen en endoscopisch materiaal. Reiniging in ultrasone bakken. Verzamelen van vuile instrumenten.

GEBRUIKSPROTOCOL

MEDISCH-CHIRURGISCH INSTRUMENTARIUM

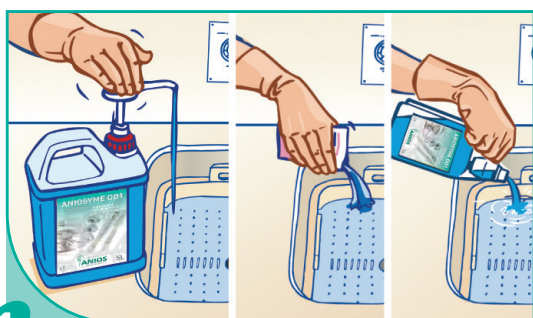


1

Verdunning aan 0,5 %: Giet een dosis van 25 ml in 5 liter koud of lauw water.



3

Spoel zorgvuldig en overvloedig met leidingwater (van goede microbiologische kwaliteit).

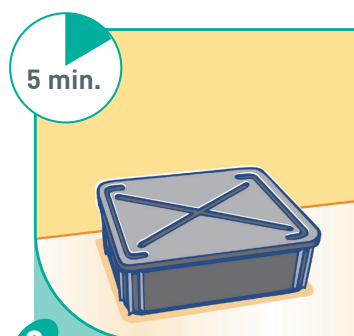

2

5 min.

Dompel de medische hulpmiddelen volledig onder. Aanbevolen onderdompelingstijd: **5 minuten**. Afwrijven en schoonmaken indien nodig.

► Warmtegevoelig materiaal:

Doorgaan naar de volgende stap (zie intern protocol van de instelling)

► Autoclaveerbaar materiaal:

Zorgvuldig drogen met een propere doek en doorgaan naar de volgende stap (zie intern protocol van de instelling).